

Приложение к свидетельству № 1941
об утверждении типа стандартных образцов
(обязательное)

ОПИСАНИЕ ТИПА СТАНДАРТНОГО ОБРАЗЦА

УТВЕРЖДЕННОГО ТИПА СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ СОСТАВА РАСТВОРА ГЕМИГЛОБИНЦИАНИДА ГСО 6096-91

ДОКУМЕНТЫ, устанавливающие требования к метрологическим и техническим характеристикам и выпуску из производства:

Технические условия № 50-03-6096-92 «Государственный стандартный образец состава раствора гемиглобинцианида» (с Извещением об изменении № 1, зарегистрированным 03.03.1997 за № 070/004491/01).

Технологический регламент производства № ПР 42-01898782-001-92, утвержденный 24.03.1992

ФОРМА ВЫПУСКА: Серийное непрерывное производство

НОМЕР ПАРТИИ И ДАТА ВЫПУСКА: партия № 010211, 25.02.2011г.

НАЗНАЧЕНИЕ: для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, колориметров фотоэлектрических, гематологических анализаторов и др.) при определении массовой концентрации гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ:

- **сфера государственного регулирования:** осуществление деятельности в области здравоохранения

ДОКУМЕНТЫ, определяющие применение:

- **на методики (методы) измерений (анализа, испытаний):** унифицированная методика для определения массовой концентрации гемоглобина в крови гемиглобинцианидным методом, утвержденная приказом Минздрава СССР № 960 от 15.10.1974

ОПИСАНИЕ: материал стандартного образца представляет собой стерильный раствор оранжево-красноватого цвета, изготовленный из эритроцитов донорской крови. СО расфасован в стеклянные ампулы шприцевого наполнения из нейтрального светозащитного стекла, объем раствора в ампуле 5 см³. Ампулы упакованы в коробки из картона коробочного по 5-10 штук. СО может поставляться в комплекте с набором химических реагентов, используемых при его применении

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Аттестуемая характеристика - массовая концентрация гемиглобинцианида, г/дм³.

Интервал допускаемых аттестованных значений СО 0,6–1,0 г/дм³;

Границы допускаемых значений относительной погрешности аттестованного значения СО при доверительной вероятности 0,95 ±3%

СРОК ГОДНОСТИ ЭКЗЕМПЛЯРА: 1,5 года

Приложение к свидетельству № 1941
об утверждении типа стандартных образцов
(обязательное)

Место и способ нанесения знака утверждения типа на сопроводительные документы стандартного образца: полиграфическим способом в правом верхнем углу первого листа паспорта стандартного образца утвержденного типа.
Способом глубокой печати в правом верхнем углу на ампулу стандартного образца утвержденного типа.

РАЗРАБОТЧИКИ: - Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский научно-исследовательский институт метрологии» (ФГУП «УНИИМ»),
620000, ГСП-824, Екатеринбург, ул. Красноармейская, 4;
- ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России,
620030, г. Екатеринбург, ул. Летняя, д. 23.

ИЗГОТОВИТЕЛИ: - ФГУП «НПО «Микроген» Минздравсоцразвития России,
620030, г. Екатеринбург, ул. Летняя, д. 23;
- ООО «Биоспектр»,
620026, г.Екатеринбург, ул. Луначарского д.194, к.214

Заместитель
Руководителя Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии

подпись

В.Н.Крутиков
расшифровка подписи

М.п. «__» _____ 2011 г.